

リッチェル  
スヌービー  
鼻水吸い器




スヌービー鼻水吸い器



4 973655 485309

特 長

- 口元で吸う力を加減しながら、やさしく吸い取ってあげることができます。
- 吸い取った鼻水はボトルに溜まります。赤ちゃんの鼻に逆流したり、お母さんの口に入りにくい形状になっています。
- ボトルとノーズピースが一体型なのでお母さんの手にボトルが隠れ、赤ちゃんが怖がらないように取ってあげられます。
- ノーズピースはやわらかいシリコンゴムを使用、しかも鼻の穴にしっかりフィットし鼻粘膜を刺激したり傷をつける心配がありません。
- 透明ボトルなので、鼻水の状態や量を確認しながら吸い取れます。
- フタ、ノーズピース部分は取外せるので、お手入れ簡単で衛生的です。

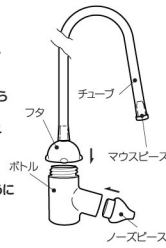

使い方

- マウスピースをくわえ、フタ側を下に向けないように赤ちゃんの鼻にノーズピースを密着させ、最初はゆっくりと調節しながら吸引してください。

お手入れ

- ご使用後はフタ、ノーズピースを外し流水又はぬるま湯でよく洗い、乾燥後、組み立てた状態で保管してください。
- ボトル、マウスピース、ケースは熱により変形の恐れがありますので、煮沸または、電子レンジでの消毒や食器乾燥器の使用は避けてください。それ以外のパーツは煮沸または、電子レンジでの消毒が可能です。

- ▲注意
- 赤ちゃんの手の届かないところに保管してください。
  - 急激に吸引しないでください。
  - 鼻血が出るようでしたら、ご使用をお避けください。
  - 用途以外のご使用は避けてください。

- 重要
- チューブを洗浄するとき、とがったもので突いたり、無理に引っばったりすると破れることがあります。
  - ボトル、マウスピース、ケース以外のパーツを煮沸消毒するときには、大き目の鍋にお湯をたっぷり入れ、火を止めて5分間程浸け置きしてください。また過度の煮沸は製品を早く傷めますので注意してください。
  - 使用後はすぐに洗浄してください。
  - 火のそばに置かないでください。
- 軟化し変形などの原因となることがあります。
- たわし又はみがき粉でみがくと、キズがつくことがあります。
  - ケースのフタと本体をひねったり強くひっぱらないでください。折り曲げ部が切れることがあります。

材 質

ボトル・マウスピース：ポリスチレン  
フタ・ケース：ポリプロピレン  
ノーズピース・チューブ：シリコンゴム



この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、この商品が不用となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様ご負担でお送りください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592 お客様相談室/TEL.076)478-2957  
(受付時間: 土日、祭祭日を除く平日9:00~17:00)

<http://www.richell.co.jp/>

DETERMINED PRODUCTIONS, INC., SAN FRANCISCO

MADE IN CHINA

0407