

電子レンジ消毒
煮沸消毒・薬液消毒 OK



● まるみがあるのてほほに跡がつきにくいです。
● 乳首は丈夫なシリコンゴム製です。
● 清潔に保てるキャップ付きです。

使用上の注意

- 警告**
- 必ず保護者の目の届く範囲で使用してください。赤ちゃんが予期しない行動をとりケガや事故の原因となるおそれがあります。
 - 使用前に必ずキズ・亀裂・欠けなどがないか確認してください。
 - キズ・亀裂・欠けなどが生じた場合は、すぐに使用を中止してください。
 - 本品にヒモをつける場合は、市販のおしゃぶり専用ホルダー以外のものは取りつけないでください。窒息のおそれがあります。
 - 赤ちゃんが寝入ったら必ずおしゃぶりをはずしてください。窒息のおそれがあります。
 - 赤ちゃんの肌が風邪などで荒れたり弱ったりしている時は、使用しないでください。
- 注意**
- 初めて使用する時は、必ず洗浄・消毒してください。
 - おしゃぶり以外の用途では使用しないでください。
- 重要**
- 電子レンジによる蒸気消毒をする時は、各消毒用品の取扱い方法に従ってください。
 - 薬液消毒する時は、ハベィ専用消毒液を使用してください。各消毒液の使用方法に従ってください。
 - 過度の煮沸は製品を早くいためますので避けてください。煮沸消毒する時は、大きめの鍋にお湯をたっぷり入れ2~3分煮沸してください。
 - 繰り返し煮沸消毒すると塗柄がはがれるおそれがあります。
 - 保管する際は必ず乾かしてからキャップをつけてください。
 - 火のそばに置かないでください。

※スヌービーおしゃぶりには次の種類があります。月齢に合わせて使用してください。

●新生児用(0~3ヵ月) ●2・3ヵ月から用 ●8ヵ月から用

洗浄・消毒・保管のしかた

使用後はすぐにぬるま湯につけ洗剤などで洗浄したのち、消毒してください。洗浄・消毒後は乳首の部分を指で押し、乳首内部に入った水を完全に出しきってから保管してください。

	材質	耐熱温度
乳首	シリコンゴム	120℃
キャップ	ポリプロピレン	120℃
台座、座板、リング	ABS樹脂	120℃

●この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。また、この商品が不用品となった時、「リサイクル」と明記のうえ、送料お客様で負担お送りください。

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間:土日、祝祭日を除く)
平日9:00~17:00
<http://www.richell.co.jp/>

MADE IN CHINA

DETERMINED PRODUCTIONS, INC., SAN FRANCISCO



0509